


# Electrodo Bittium OmegaSnap de ECG™

---

Guía rápida

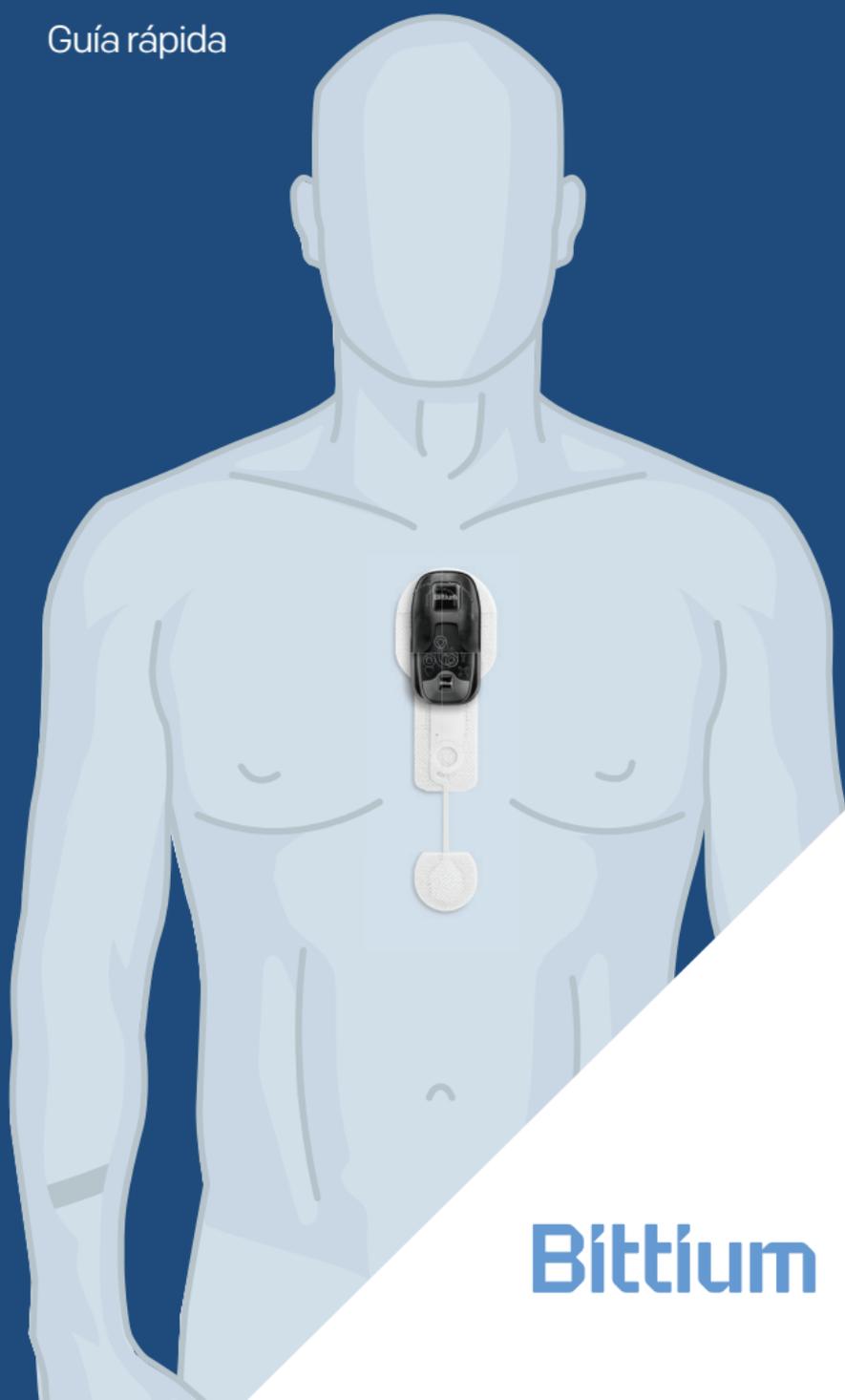

**Bittium**

# Bittium OmegaSnap™

El electrodo de ECG Bittium OmegaSnap™ está indicado para ser usado con el sensor de ECG Bittium Faros™ con el propósito de medir las señales cardíacas (ECG).

## Material



Sensor  
Bittium  
Faros™




Adaptador  
Bittium  
OmegaSnap™



Electrodo  
Bittium  
OmegaSnap™

## ¡Atención!




- ▶ Coloque el electrodo únicamente sobre piel intacta y limpia.
- ▶ No use lociones o cremas corporales en el área antes de utilizar el electrodo.
- ▶ No utilice electrodos caducados. Por favor, verifique la fecha del envoltorio.
- ▶ Cada electrodo es de uso único. La reutilización del producto puede causar infección.
- ▶ Deje de usar el sensor Faros y el electrodo OmegaSnap si observa reacciones adversas en la piel, como irritación o sarpullido. Si el problema persiste, contacte con su clínica o responsable del tratamiento.
- ▶ Reemplace el electrodo si no se adhiere a la piel.
- ▶ Retire el electrodo de la piel después de la medición.
- ▶ Utilice el electrodo solo con el dispositivo Bittium Faros™.
- ▶ El sensor Faros y el adaptador OmegaSnap deben limpiarse tras cada uso. El método de limpieza recomendado: limpieza sin alcohol y toallitas desinfectantes para dispositivos médicos, como por ejemplo las toallitas sensibles mikrozid® o SaniCloth AF3.
- ▶ Siga estas instrucciones. Para instrucciones más detalladas, consulte el manual de Faros.

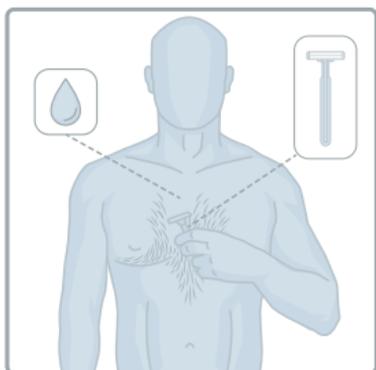

**1.**

Elimine, si fuera necesario, el vello corporal con una maquinilla de afeitar. La piel debe estar limpia y seca antes de colocar el electrodo.

**2.** Asegúrese que el envoltorio esté sin abrir antes de su uso. Ábralo y saque el electrodo.

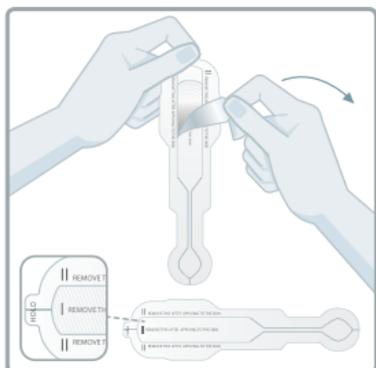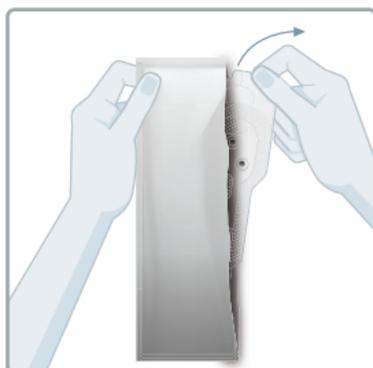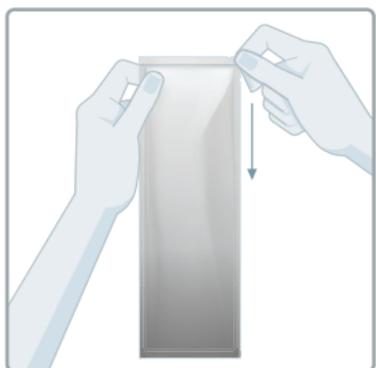



**3.**

Retire el revestimiento de plástico (I) del electrodo. No toque la superficie del adhesivo con los dedos.

**4.**

Fije el electrodo en la piel. Coloque la parte superior del electrodo debajo de la muesca supraesternal. La parte inferior del electrodo debe colocarse justo encima del diafragma.

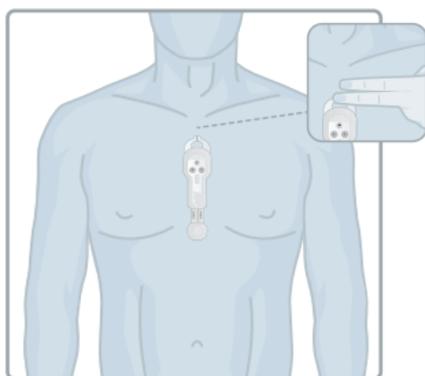

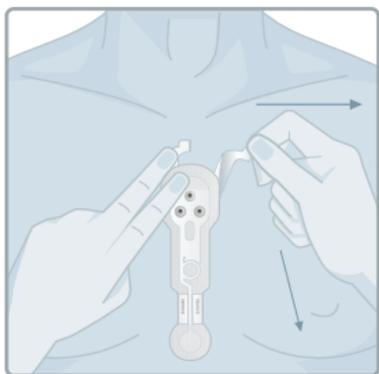


## 5.

Cuando el electrodo esté correctamente colocado, retire los revestimientos de los lados (II) por orden. No quite los dos a la vez, asegúrese de que el electrodo se adhiere a la piel.


## 6.

Asegúrese de que la superficie del sensor Faros y del adaptador OmegaSnap no estén dañados\*. Coloque el sensor Faros en el adaptador. Conecte el adaptador al electrodo y presione el dispositivo contra el electrodo para asegurarse de que los corchetes estén conectados.

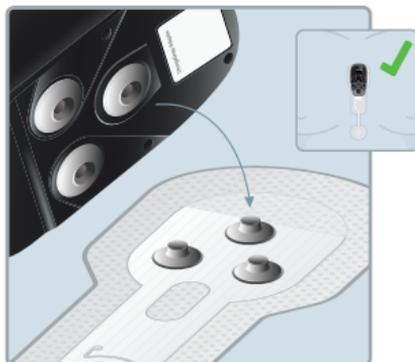

## 7.


Presione y suelte el botón de encendido para comenzar la medición. Un sonido y un parpadeo de luz verde indicarán que ha comenzado la medición.

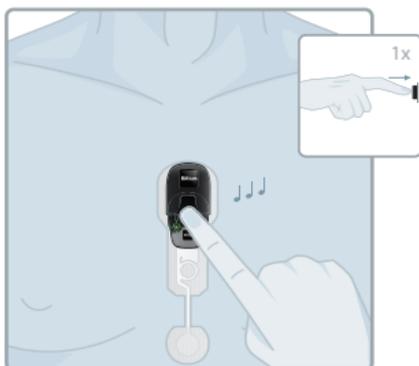


\*Si nota algún daño visual (por ejemplo, una grieta o abolladura), comuníquese con su clínica para más instrucciones.

## 8.

Cuando desee terminar la medición, presione y mantenga pulsado el botón de encendido aproximadamente 8 segundos. El dispositivo pita tres veces y la luz se apaga.

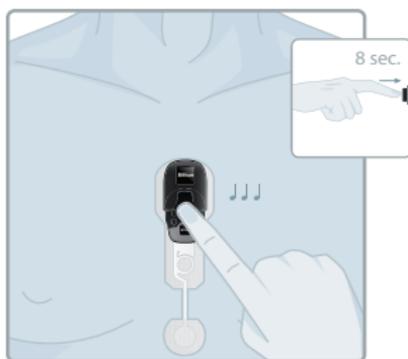

9. Retire el electrodo de la piel despegando un borde del parche y luego tirando suavemente del resto. Puede utilizar agua con jabón si fuera necesario. Deshágase del electrodo usado de acuerdo a las normas locales de tratamiento de reciclado. Devuelva el sensor Faros y el adaptador a su clínica o responsable del tratamiento.

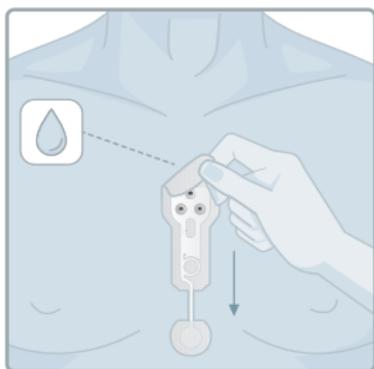

## Leyenda

 Marcado CE

 No reutilizar

 Fecha de fabricación

 LOT Número de lote

 Fabricante

 Fecha de caducidad

 Siga las instrucciones de uso

# Bittium



Bittium Biosignals Oy  
Pioneerinkatu 6  
70800 Kuopio, FINLAND



Tel: +358 (0)17 581 7700  
email: [bbs@bittium.com](mailto:bbs@bittium.com) or  
[medical.support@bittium.com](mailto:medical.support@bittium.com)

[www.bittium.com](http://www.bittium.com)